

Produktil Bioregenerating Hyaluronic Acid



Regeneración de la matriz extracelular

PRODUKTIL actúa sobre la Matriz Extracelular, que es fundamental para la regeneración de productos activos como el colágeno y la elastina, y para el metabolismo de la piel, ya que proporciona el sustrato para la migración celular y mantiene la polaridad correcta de la piel.

boinnovación

Aminoácidos precursores de colágeno

PRODUKTIL contiene aminoácidos regeneradores (Hidroxiprolina, Prolina, Glicina y Lisina) que facilitan la producción intracelular del PRECOLÁGENO y que polimeriza posteriormente en la matriz extracelular para formar el TROPOCOLÁGENO (colágeno maduro)

boremodelación


Refuerza la estructura tisular

PRODUKTIL participa activamente en la restauración de la Matriz Extracelular, acelera el metabolismo de las células y ralentiza drásticamente el proceso de envejecimiento de la piel, el "cronoenvejecimiento".


Formación de neocolágeno

Beneficios

- Hidratación profunda gracias a un ácido hialurónico de alta concentración y peso molecular.
- Acelera el metabolismo celular restaurando la fisiología de la matriz extracelular (MEC).
- Acción bioregenerativa que permite a los fibroblastos producir colágeno y elastina.
- Acción Antiaging eutrófico del tejido conectivo, que devuelve elasticidad y firmeza.
- Restaura la elasticidad y textura cutánea.

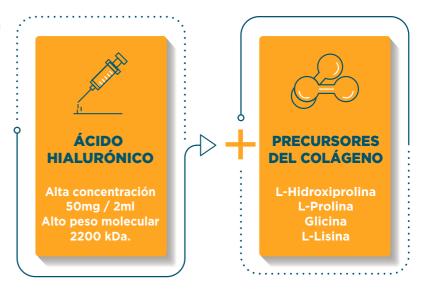



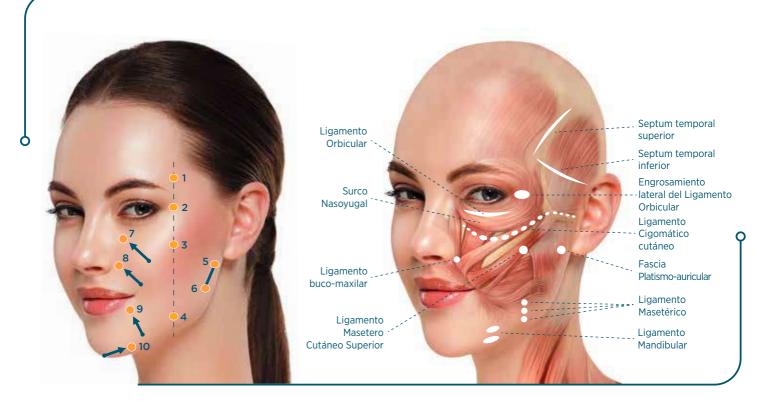

INNOVACIÓN. NUEVA TÉCNICA DE INYECCIÓN:




10 PUNTOS DE INYECCIÓN

Basados en los ligamentos de retención cutáneos.

Efecto elástico y suspensor cutáneo.

- 1 · Ligamento Temporal (1/3 inferior de la cresta temporal).
- 2 · Engrosamiento lateral orbital (2 cms lateral canto externo del ojo).
- 3 · Ligamento Cigomático (zona media bordes superior/inferior arco cigomático).
- 4 · Ligamento Masetérico (borde anterior del músculo masetero).
- 5 · Fascia Platismo-auricular.
- 6 · Ángulo de la mandíbula. Ligamento Parotídeo cutáneo.
- 7 · Línea medio-pupilar con ala de la nariz, orientar la aguja hacia surco nasoyugal = Ligamento orbitomalar.
- 8 · Longitudinal al surco nasogeniano, orientar la aguja hacia ala de la nariz = ligamento buco-maxilar.
- 9 · Longitudinal a línea de marioneta, por debajo de comisura bucal.
- 10 · Ligamento mandibular (por delante del jowl).
 - ▶ Inyectar 0,1 ml. por cada punto de marcado en pápula intradérmica profunda. 1 ml. por hemicara.

SÍNTESIS DEL COLÁGENO

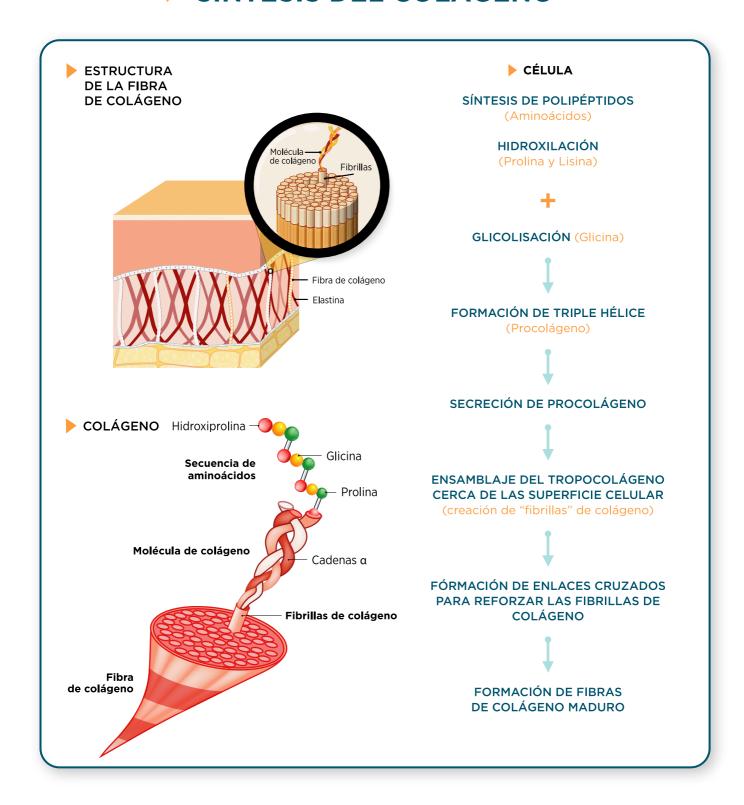

► HIGH INTEGRATION TECHNIQUE (HIT)

Mediante espectrofotometría de masas se determina un AH único y extra puro que, combinado con la selección de un peso molecular muy alto (2200kDa) único en el mercado, y gracias a la técnica HIGH WEIGHT & PURITY SCREENING favorece la integración de los péptidos en el AH mediante la presión y calor ejercidos con la Peptide Integration Technique.

► RESULTADOS INMEDIATOS



▶ PROTOCOLO DE INYECCIÓN



1 jeringa (2mL) por sesión.

1 sesión al mes durante 3 meses (3 sesiones)



Cara, cuello, escote, brazos y manos.

Técnica en multipunción (pápula o retrotrazado).



Dermis Profunda Aguja 30G (o cánula 27G/25G).





La confianza de que la satisfacción del cliente y su seguridad es nuestra prioridad.



Gran diversidad de productos en medicina estética de alta calidad y última tecnología

Dispositivo médico clase III compuesto por ácido hialurónico lineal presentado en 2 jeringas de 2ml/50mg con aminoácidos y precursores del colágeno.



DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR:



Sebbin Ibérica Productos Médicos, S.L. C/ Llull, 85 - Bajo · 08005 Barcelona Tel. 93159 3003 www.sebbin.com

FABRICANTE:



THE WAVE INNOVATION GROUP SRLS

Via Barucchi, 47/A 37139 Verona (Italy) www.thewaveresearch.it